

Mannequin nouveau né / Babypop pasgeborene

Art. 311469 & 311470

Informations importantes avant l'utilisation du produit

DO's	DON'Ts
<p><u>Manipuler avec précaution</u> Ce modèle est fabriqué dans un matériau souple spécial. Veuillez le manipuler avec le plus grand soin, comme un vrai bébé, à tout moment.</p> <p>Après chaque séance de formation, séchez le modèle avec un chiffon doux et appliquez du talc.</p> <p>Le modèle doit être rangé habillé et dans la housse fournie, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil.</p> <p><u>Allaitement au biberon et changement de couche</u> Avant de commencer la séance de formation de l'allaitement, mettre une couche au modèle. Le fluide administrés'écoulera en effet immédiatement.</p> <p>Utilisez de l'eau pour la pratique de l'allaitement au biberon.</p>	<p>Ne jamais essayer le modèle avec un diluant (<i>thinner</i>) ou un solvant organique.</p> <p>Ne marquez pas le modèle avec un stylo (à bille) et ne laissez aucun matériau imprimé en contact avec la surface de la peau du modèle.</p> <p>Les marques d'encre sur les modèles seront indélébiles.</p>

Belangrijke informatie voordat u het product gebruikt

DO's	DON'Ts
<p><u>Behandel met zorg</u> Dit model is gemaakt van een speciaal, soepel materiaal. Behandel het steeds met de grootste zorg zoals een echte baby.</p> <p>Droog het model na elke oefensessie met een zachte doek af en breng talkpoeder aan.</p> <p>Het model dient aangekleed bewaard te worden en in de meegeleverde hoes, uit de buurt van hitte, vocht en direct zonlicht.</p> <p><u>Flesvoeding en luier verschonen</u> Voordat u de oefensessie met flesvoeding begint, dient u een luier aan te brengen, aangezien de toegediende vloeistof onmiddellijk doorstroomt.</p> <p>Gebruik water voor het oefenen van de flesvoeding.</p>	<p>Veeg het model nooit af met een verdunner (<i>thinner</i>) of met een organisch oplosmiddel.</p> <p>Markeer het model niet met een pen en laat geen bedrukt materiaal in contact komen met het huidoppervlak van het model.</p> <p>Inktmarkeringen op de modellen zijn onuitwisbaar.</p>

Vincent leermiddelen Scientific

Boomsessteenweg 826 – 2610 Wilrijk – Belgium

www.leermiddelen.be - www.didactique.be

info@leermiddelen.be - info@didactique.be

Tel +32 3 239 49 62

Mannequin nouveau né / Babypop pasgeborene

Art. 311469 & 311470

Séances de formation	Handelingen
<p><u>Bain</u> Le cou du mannequin n'est pas rigide, simulant les nouveau-nés avant qu'ils aient la capacité de lever/maintenir la tête. Après la formation, séchez le modèle avec un chiffon doux et appliquez du talc.</p>	<p><u>Bad</u> De nek van de oefenpop is niet stijf en simuleert pasgeborenen voordat ze het vermogen hebben om hun hoofd op te houden. Droog het model na de training met een zachte doek af en breng talkpoeder aan.</p>
<p><u>Allaitement au biberon</u> La bouche et l'ouverture de l'urètre sont reliées et le modèle laisse s'écouler l'urine pendant l'allaitement.</p>	<p><u>Flesvoeding</u> De mond en de opening van de urethra zijn met elkaar verbonden en het model laat de urine doorstromen tijdens de flesvoeding.</p>
<p><u>Exercices</u> Les membres peuvent se plier et s'étirer; le matériau souple du modèle permet aux stagiaires de pratiquer les procédures de soin de bébé comme avec un vrai bébé.</p>	<p><u>Oefeningen</u> De ledematen kunnen buigen en strekken; het soepele materiaal van het model stelt stagiairs in staat om procedures van de babyverzorging te oefenen, net als bij echte baby.</p>
<p><u>Changement de couche et habillage</u> Le cou du mannequin n'est pas rigide, simulant les nouveau-nés avant qu'ils aient la capacité de lever/maintenir la tête. Après la formation, séchez le modèle avec un chiffon doux et appliquez du talc.</p>	<p><u>Luier verschonen en aankleden</u> De nek van de oefenpop is niet stijf en simuleert pasgeborenen voordat ze het vermogen hebben om hun hoofd op te houden. Droog het model na de training met een zachte doek af en breng talkpoeder aan.</p>
<p><u>Cordon ombilical</u> Le cordon ombilical est amovible.</p>	<p><u>Navelstreng</u> De navelstreng is verwijderbaar.</p>

Vincent leermiddelen Scientific

Boomsessteenweg 826 – 2610 Wilrijk – Belgium

www.leermiddelen.be - www.didactique.be

info@leermiddelen.be - info@didactique.be

Tel +32 3 239 49 62