




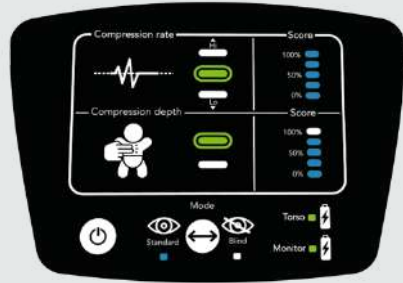
QUESTIONS FRÉQUENTES

MONITEUR

Si l'équipement ne peut pas être couplé, en suivant les étapes indiquées, le moniteur doit être réinitialisé.

Réinitialisation du moniteur:
Appuyez sur le bouton «Mode» pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que les icônes de fréquence  et de compression  clignotent une fois.

Éteignez le moniteur  et recommencez le processus de synchronisation.




PILES

Les piles fournies avec l'équipement Practi-Baby Plus doivent être remplacées lorsque le voyant du moniteur s'allume en rouge.

L'utilisation de piles déchargées dans le moniteur et dans le torse empêche le bon fonctionnement du Practi-Baby Plus.

L'équipement permet l'utilisation de piles rechargeables.

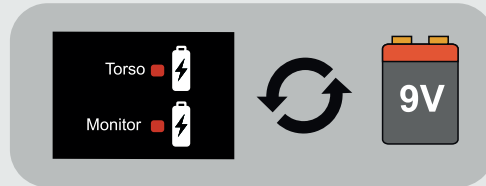

NETTOYAGE

N'utilisez pas de liquides pour nettoyer l'intérieur du mannequin. N'immergez aucune pièce.

PILE

Utilisez des piles au carbone-zinc ou alcalines 9V du commerce. Les piles doivent être remplacées par d'autres d'un type approprié. Retirez les piles lorsqu'un produit n'est pas utilisé pendant une longue période.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



PRACTI-BABY PLUS. Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53 / UE du Conseil sur les équipements de raid (RED) et de la directive 2011/65 / UE du Conseil sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (ROHS).



Veillez les éliminer conformément aux réglementations de votre pays.

GESTION DES DÉCHETS

PRACTI-BABY PLUS contient des composants électroniques. Veuillez vous en débarrasser dans un centre de recyclage approprié conformément aux réglementations locales.

Directive européenne 2012/19 / UE (DEEE)

DEEE: Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19 / UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour la santé et l'environnement d'une mauvaise gestion des déchets de ce produit.

Le symbole qui apparaît sur le produit ou dans les documents d'accompagnement indique que cet appareil ne peut pas être traité comme déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être apporté au centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électroniques. L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations environnementales locales concernant l'élimination des déchets. Pour obtenir des informations détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service d'élimination domestique ou le représentant PRACTI-BABY PLUS auprès duquel vous avez acheté le produit.



VICEDO MARTI S.L.
C/ Àvila, 2 - 03440 Ibi - SPAIN

TEL. +34 965 554 708 - www.practiman.com - international@practiman.com

MONITEUR MANUEL



MONITEUR
SANS FIL



FEEDBACK
ÉLECTRONIQUE



TEST À
L'AVEUGLE



TEST REPORT
APRÈS LA PRATIQUE




**MEETS
AHA/ERC
FEEDBACK
REQUIREMENTS**

PRACTI-BABY PLUS
ELECTRONIC CPR TRAINING




FONCTIONS PRINCIPALES

FEEDBACK DE COMPRESSION

FREQUENCE: 100 <-> 120 bpm

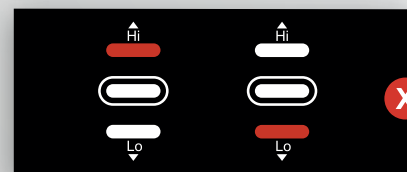


PROFONDEUR: 1/3 Diamètre du torse

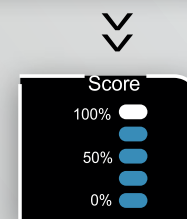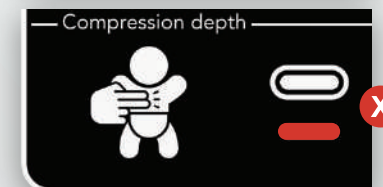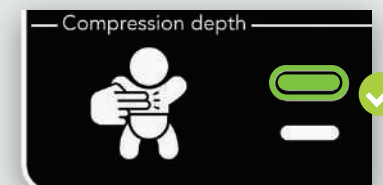

TEST REPORT



ATTENDRE À 10 SECONDES

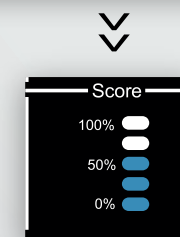

MISE EN MARCHÉ

x 1 TORSO



x 1 MONITOR




Insérez les piles dans le torse et le moniteur (inclus dans chaque pack PRACTI-BABY PLUS).

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


MODE STANDARD / TEST À L'AVEUGLE

Il permet de sélectionner entre le mode standard et l'aveugle.

MODE STANDARD

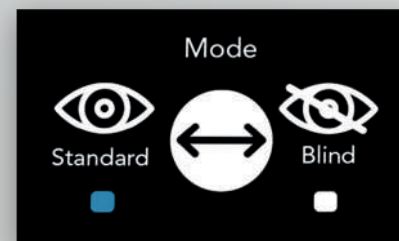

TEST À L'AVEUGLE

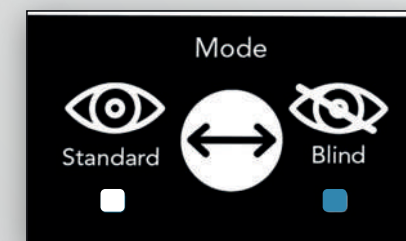

SYNCHRONISATION

Allumez le moniteur et appuyez sur le torse du PRACTI-BABY PLUS jusqu'à ce que vous entendiez le double bip et que «TORSE» devienne vert. PRACTI-BABY PLUS est prêt à commencer la pratique.



Par défaut, le mode adulte est toujours activé lorsque le moniteur est allumé.



En test à l'aveugle, le feedback n'est pas visible pendant la pratique, cependant après la fin de la séance et après 10 secondes, le test report sera affiché comme en mode standard.