


## FAQ

### MONITOR

Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den angegebenen Schritten koppeln können, müssen Sie den Monitor zurücksetzen.

Monitor Reset: Drücken Sie die Taste "Mode" für ca. 7 Sekunden, bis die Geschwindigkeits- und Komprimierungssymbole einmal blinken.

Schalten Sie den Monitor aus und beginnen Sie erneut mit der Verbindung.

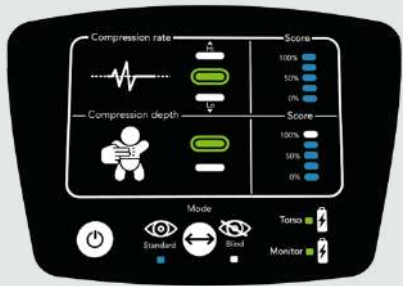


### BATTERIE

Die mit dem Practi-Baby Plus-Gerät gelieferten Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn das rote Licht auf der Monitoranzeige erscheint.

Die Verwendung von ungeladenen Batterien mit dem Monitor oder dem Torso beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion des Practi-Baby Plus.

Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien treten keine Interferenzen auf.

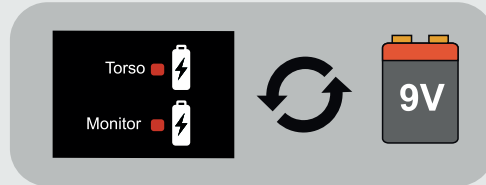

### REINIGUNG

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um das Innere des Trainingsmodells zu reinigen. Tauchen Sie keine Teile des Trainingsmodells unter.

### BATTERIE

Verwenden Sie nur herkömmliche Zink-Kohle- oder alkaline Batterien (9V). Die Batterien müssen durch die korrekte Batterieart ersetzt werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

### BEDEUTUNG DER SYMBOLE



PRACTI-BABY PLUS. Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates 2014/53/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) sowie der Richtlinie des Rates 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).



Nach den, für Ihr Land, geltenden Empfehlungen entsorgen.

### UMGANG MIT ABFALLPRODUKTEN

Der PRACTI-BABY PLUS enthält elektronische Bauteile. Entsorgen Sie ihn in einer geeigneten Recycling-Anlage gemäß den örtlichen Vorschriften.

Europäische Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten können.

Das Symbol auf dem Produkt oder den ihm beiliegenden Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die Entsorgung ist gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung vorzunehmen. Detailliertere Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem PRACTI-BABY PLUS, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### MONITOR ANLEITUNG



KABELLOSER  
MONITOR



ELEKTRONISCHES  
FEEDBACK



BLINDMODUS




TESTBERICHT NACH  
DEM TRAINING



**MEETS  
AHA/ERC  
FEEDBACK  
REQUIREMENTS**

**PRACTI-BABY PLUS**  
ELECTRONIC CPR TRAINING

**SCHLUSSELFUNKTIONEN**  
**KOMPRESSIONS-FEEDBACK**

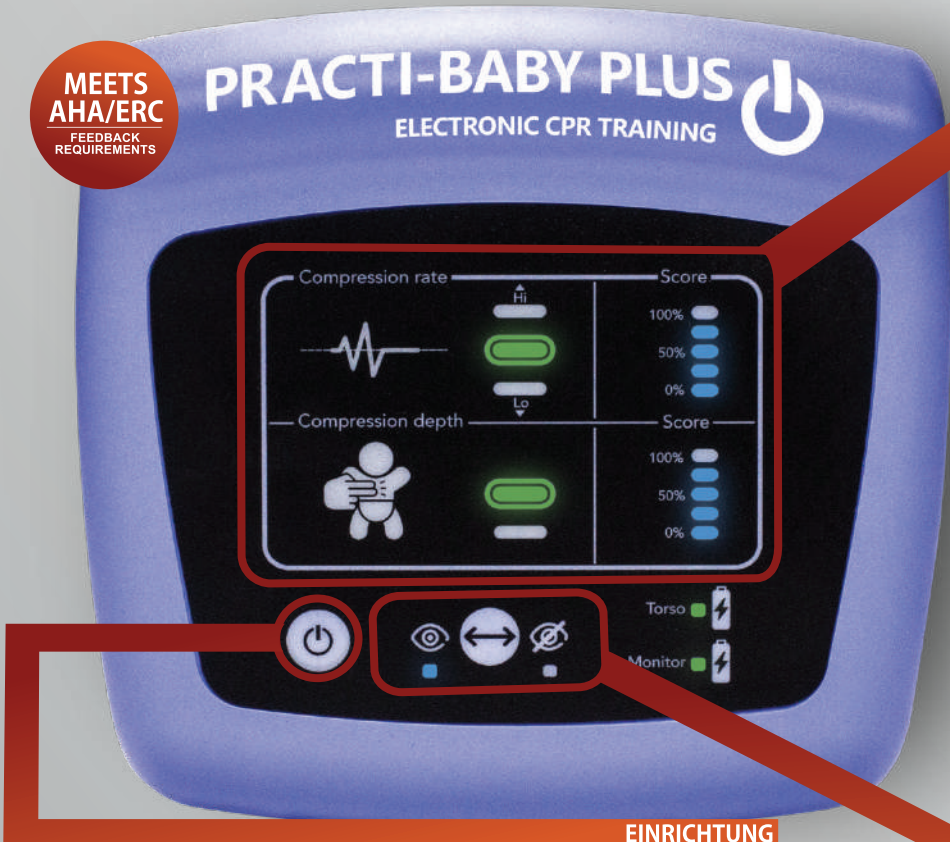

**EINRICHTUNG**

**BEWERTUNG: 100 <=> 120 bpm**

Compression rate

**TIEFE: 1/3 Brustdurchmesser**

Compression depth

Score

100%

50%

0%

**TESTBERICHT**

**WARTEN SIE  
10 SEKUNDEN**

Score

100%

50%

0%

x 1 TORSO



x 1 MONITOR



Legen Sie Batterien in den Torso und den Monitor ein (in jedem Practi-Baby Plus-Paket enthalten).

**ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN**

**STANDARDMODUS / BLINDMODUS**

Ermöglicht die Auswahl des Standard- oder Blindmodus

**STANDARDMODUS**

Mode

Standard Blind

**BLINDMODUS**

Mode

Standard Blind



**VERDINUNG**

Schalten Sie den Monitor ein und drücken Sie den PRACTI-BABY PLUS-Torso, bis Sie den doppelten Piepton hören und die "TORSO"-Lampe grün leuchtet. PRACTI-BABY PLUS ist jetzt bereit, mit dem Üben zu beginnen.

Beim Einschalten des Monitors wird die Standardeinstellung immer im Erwachsenenmodus aktiviert.

Im Blindmodus ist die Rückmeldung während des Trainings nicht sichtbar. Zehn Sekunden nach Beendigung der Sitzung erscheint der Testbericht genauso wie im Standardmodus.